

Coagrasper[™]

Hemostasia controlada com precisão pontual.




Coagrasper™

Coagrasper é uma pinça hemostática de coagulação monopolar direcionada que criará hemostasia no local preciso do sangramento. Uma combinação de dispositivo de hemostasia baseado em energia e mecânica, a Coagrasper irá isolar o vaso da mucosa circundante saudável para que a coagulação térmica ocorra apenas onde for necessária.



Coagrasper Tamanho Gastro (FD-410LR)

Ideal para uso no esôfago e estômago, onde a mucosa é mais espessa e geralmente apresenta uma mistura de vasos menores e maiores. A largura de abertura de 5 mm fornece um tamanho intermediário para segurar com segurança esta variedade de vasos.

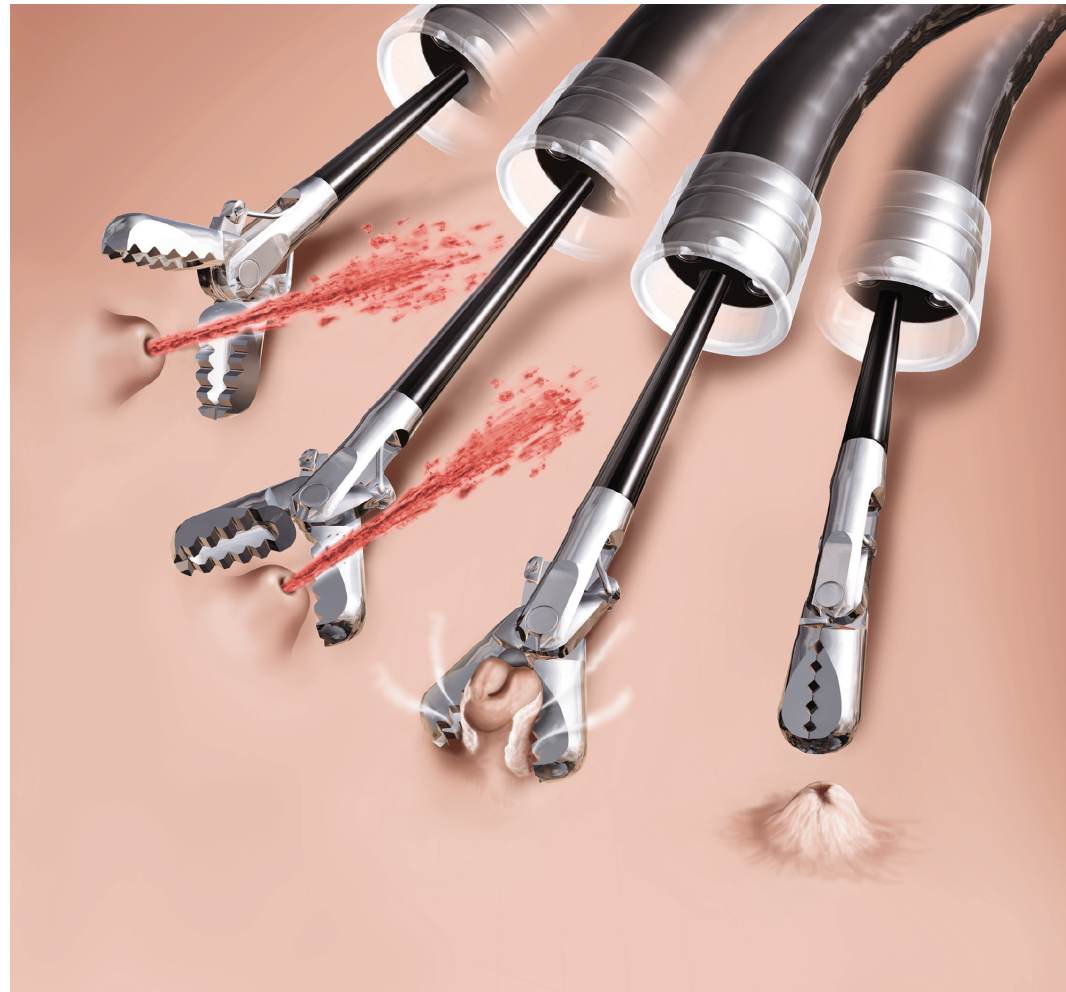

Hemostasia controlada com precisão pontual

Coagrasper

Funcionalidade Abrir / Fechar

A funcionalidade de abrir / fechar irrestrita permite que a pinça trate economicamente vários locais de sangramento em um único paciente.



Terapia térmica precisa

O design do forcep facilita a apreensão e o isolamento do vaso da mucosa saudável antes da aplicação térmica e dispersa uniformemente a terapia térmica.

Rotação para Segmentação aprimorada


A rotação intuitiva de um para um permite um direcionamento preciso em todos os modelos.





- 1.** Puxe o controle deslizante para abrir a pinça.



- 2.** Gire a alça para definir a pinça.
(a rotação no sentido horário é mais suave)

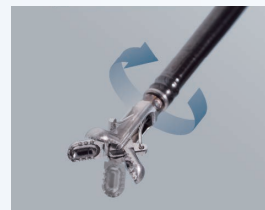

- 3.** Use a pinça para atingir o tecido e segure.
Aplique corrente de alta frequência enquanto levanta ligeiramente o tecido.

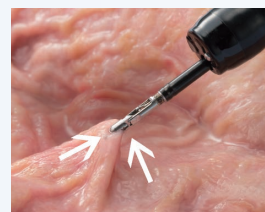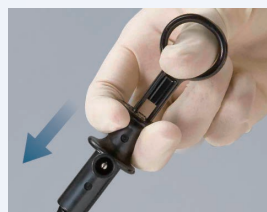

Observação: empurrar o tecido para baixo ao aplicar corrente ao fórceps pode causar perfuração retardada.

Especificações

Produto	Código	Energia	Abertura	Comprimento	Diâmetro	Canal de Trabalho
Coagrasper	FD-410LR	Monopolar	5 mm	165 cm	2.75 mm	2.8 mm

LCR 2107003

Olympus e Coagrasper são marcas registradas da Olympus Corporation, Olympus America Inc. e / ou suas afiliadas.