

ITknife nano[™] **Faca Eletrocirúrgica**

Dissecção eficaz no esôfago, cólon e reto.




ITknife nano™ KD-612L/U


Obtenha versatilidade de corte aprimorada com a ITknife nano. Com base na popularidade do ITknife2™, a nano apresenta uma ponta isolada menor projetada para melhorar a capacidade de manobra no espaço submucoso, permitindo uma dissecação eficaz no esôfago, cólon e reto.

Características & Benefícios


- 1 Ponta Isolada menor**
A dissecação eficaz em áreas como esôfago, cólon e reto pode ser obtida com a ponta isolada menor.

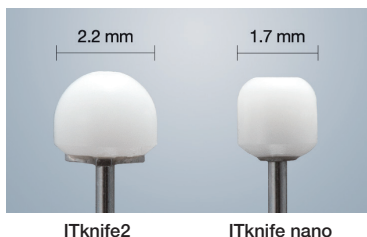

- 2 Eletrodo em forma de disco**
O eletrodo em forma de disco no lado proximal da ponta isolada é projetado para fornecer controle preciso da área de corte.

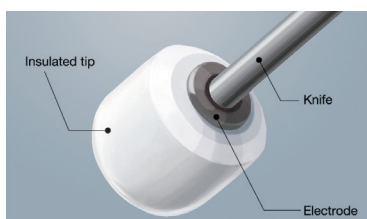


- 3 Comprimento de faca otimizado**
Para melhorar a manobrabilidade em lúmens estreitos, como esôfago e cólon, o comprimento da faca de corte do ITknife nano mede 3,5 mm, em comparação com o ITknife2, que mede 4 mm.

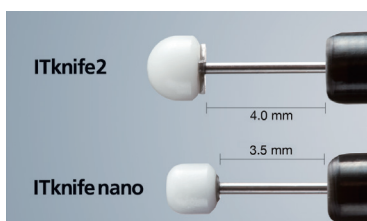

Especificações

CÓDIGO	MÁXIMO DIÂMETRO DA PORÇÃO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	COMPRIMENTO DA FACA (mm)	DIÂMETRO DA FACA (mm)	DIÂMETRO ELETRODO (mm)	DIÂMETRO PONTA (mm)
KD-612L	ø 2.6	1650	3.5	ø 0.4	ø 0.9	ø 1.7
KD-612U	ø 2.6	2300	3.5	ø 0.4	ø 0.9	ø 1.7

Comparação de como a faca desliza sob a fina camada submucosa

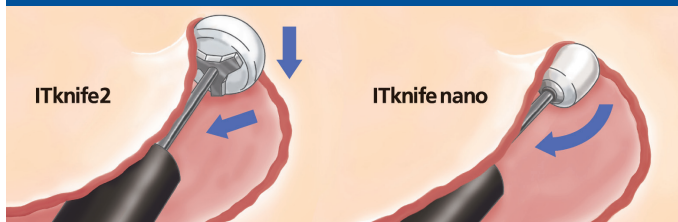

Técnica

Após a incisão inicial, use o ITknife nano para completar um corte circunferencial ao redor da lesão. Dissecar o tecido puxando o dispositivo ao longo da mucosa lateralmente e / ou longitudinalmente. Para obter instruções de operação detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções KD-612L/U que foi incluído na compra do ITknife nano.

Declaração de Cuidado

Antes de usar, leia atentamente o manual e use o produto conforme indicado. Estes instrumentos foram projetados para uso por médicos ou equipe médica sob a supervisão de um médico.

Em certos casos, o uso desses instrumentos pode causar perfuração ou sangramento e pode exigir intervenção cirúrgica como medida de emergência. Só use este produto se você ter recebido treinamento apropriado para desenvolver uma compreensão da aplicação clínica e do uso adequado deste produto.

Nota: O ITknife nano é contra-indicado para áreas com uma camada mucosa espessa, como o estômago.

LCR 2106015

Olympus, Coagrasper, ITknife nano e ITknife2 são marcas comerciais ou marcas registradas da Olympus Corporation, Olympus America Inc., e / ou suas afiliadas.