

TTknife™ (Triangle Tip) Bisturi Eletrocirúrgico

Corte multidirecional para todas as etapas do procedimento de ESD.



TTknife™ (Triangle Tip) KD-640L

O TTknife (Triangle Tip) é projetado para versatilidade no procedimento ESD, permitindo que o dispositivo corte em todas as direções sem a necessidade de rotação. Da marcação à dissecação, o TTknife oferece múltiplas opções de corte.

Características & Benefícios

1 Ponta do eletrodo triangular


O design da ponta permite o corte na direção desejada sem a necessidade de girar o dispositivo.

2 Design Versátil

Da marcação à dissecação, a forma triangular da ponta é projetada para abordar várias etapas durante o procedimento.

Técnica

Para marcação, use um canto do dispositivo para coagular o tecido ao redor da lesão. Crie tensão para dissecar o tecido enganchando a mucosa e levantando-a. Aplique corrente eletrocirúrgica para realizar o corte. Para obter instruções operacionais detalhadas, certifique-se de seguir o Manual de Instruções KD-640L incluso na embalagem do TTknife.

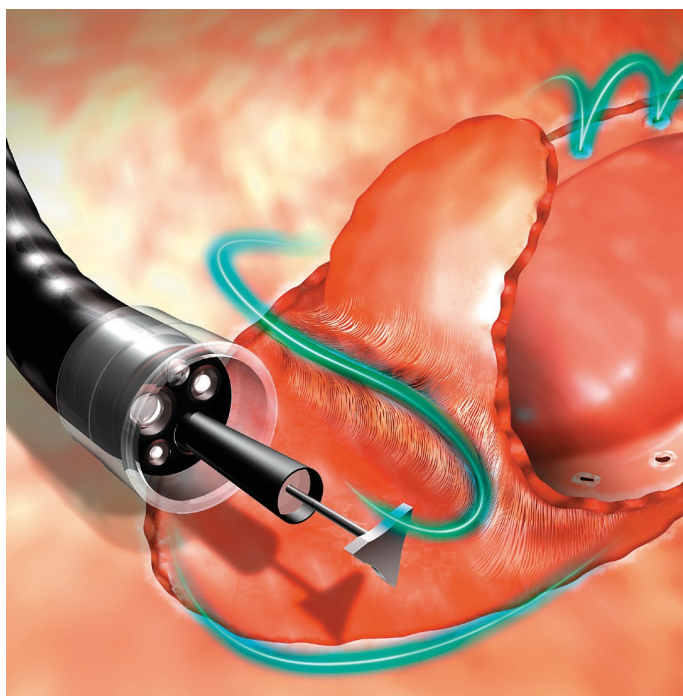

TriangleTipKnife

Especificações

CÓDIGO	DIÂMETRO PORÇÃO MÁXIMA DE INSERÇÃO	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)	COMPRIMENTO DA FACA (MM)	DIÂMETRO DA FACA (mm)	COMPRIMENTO DA PONTA TRIANGULAR (mm)	ESPESSURA DA PONTA TRIANGULAR (mm)
KD-640L	ø 2.6	1650	4.5	ø 0.4	0.7	0.4

Declaração de Cuidado

Antes de usar, leia atentamente o manual e use o produto conforme indicado. Estes instrumentos foram projetados para uso por médicos ou equipe médica sob a supervisão de um médico.

Em certos casos, o uso desses instrumentos pode causar perfuração ou sangramento e pode exigir intervenção cirúrgica como medida de emergência.

Use este produto somente se tiver recebido treinamento apropriado para desenvolver uma compreensão da aplicação clínica e do uso adequado deste produto.

LCR - 2106003

OLYMPUS

OLYMPUS AMERICA INC.
3500 Corporate Parkway, PO Box 610, Center Valley, PA 18034

Para obter mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Olympus.
www.medical.lympusamerica.com

©2013 Olympus America Inc. All rights reserved.
Printed in USA OAIET0613BRO11401